



... LABORATORIES ...
HYAMED
· GENEVA ·


Class III



ÜBER UNS HYAMED



ERREICHEN SIE DEN ÄSTHETIKMARKT MIT PRÄZISERER TECHNOLOGIE.

Die in Genf, Schweiz, ansässigen Laboratories Hyamed sind auf die Entwicklung, Produktion und den Vertrieb von implantierbaren und injizierbaren medizinischen Geräten für die plastische und ästhetische Chirurgie, Dermatologie und Anti-Aging-Behandlungen spezialisiert.

Die patentierten Technologien der injizierbaren, vernetzten Hyaluronsäurefüller von Hyamax wurden von Wissenschaftlern und Ingenieuren entwickelt, die auf injizierbare medizinische Biopolymerprodukte spezialisiert sind und über mehr als 15 Jahre Erfahrung in Deutschland, der Schweiz, den USA, Kanada und Japan verfügen. Das Qualitätsmanagementsystem von Laboratories Hyamed ist nach ISO 13485 zertifiziert, und Hyamed hat von der Europäischen Union die CE-MDR-Konformitätszertifizierung erhalten.

Seit seiner Gründung im Jahr 2011 hat Hyamed Millionen von Schachteln mit Hyamax-Produkten in mehr als 70 Ländern weltweit verkauft und bietet den Verbrauchern ein sicheres und ansprechendes ästhetisches Erlebnis.



Hyamax® vernetzte Hautfüller sind hochviskose, biologisch abbaubare, nicht tierische, transparente Hyaluronsäuregele, die durch den patentierten Vernetzungsprozess von Hyamed ein dickeres, langanhaltendes Gel erzeugen, wodurch tiefere und ausgeprägtere Linien effektiver behandelt werden können.

Da die Hyamax®-Produktreihe keine tierischen Quellen beinhaltet, wird das Risiko immunogener Reaktionen minimiert. Die in der Hyamax®-Produktreihe verwendete HA fügt sich auf natürliche Weise in das Gewebe ein und trägt dazu bei, die Haut gesund und natürlich zu erhalten. Da Hyamax® keine permanenten Materialien enthält, haben Kunden, die HA-Produkte verwenden, die Möglichkeit, ihre Bedürfnisse während der Behandlung neu zu evaluieren.

Die Sicherheit der Hyamax® HA-Produkte hat für uns höchste Priorität. An der Hyamax®-Produktreihe wurden die folgenden Tests durchgeführt.

- 4-wöchige Muskeltransplantation
- Akuter systemischer Injektionstest
- Biokompatibilitätstest
- Zytotoxizität
- Maximierung der Sensibilisierung bei Meerschweinchen
- pH-Wert, Osmolalität, Rest-BDDE (einschließlich Sterilität und Identifikation)
- 1 intrakutane Reaktivität
- Mutagenität
- Protein
- Rückmutationstest
- Interaktionstests mit dem Bluthämolysetest
- Lokale Wirkungstests nach der Implantation.
- Akute Toxizität
- Subchronische Toxizität





HAUTFÜLLER



PRODUKT	Hyamax® Plus Fine
Anwendung;	Hyamax® Plus Fine-Dermalfüller finden Anwendung bei der Behandlung feiner Linien, Fältchen und Augenringen.
Beschreibung;	<p>Mit fortschreitendem Alter zeigt das Gesicht aufgrund des Verlusts von Kollagen und der Schrumpfung der Gewebezellen eine Neigung zur Faltenbildung.</p> <p>Der Hautfüller Hyamax® Plus Fine korrigiert Falten, indem er in oberflächliche und mitteltiefe Gesichtsfalten, wie Stirnfalten und Glabellafalten, injiziert wird. Zudem können auch Augenringe und Schläfenvertiefungen mit dem Hautfüller Hyamax® Plus Fine behandelt werden. Die Injektionen verleihen der Haut Festigkeit und Glätte.</p>
Lagerbedin- gungen;	<p>Für optimale Stabilität und Langlebigkeit sollte die Lagertemperatur zwischen 2 °C und 25 °C liegen; idealerweise wird eine Lagerung bei 10 °C empfohlen. Das Produkt sollte vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden.</p> <p>Das Mindesthaltbarkeitsdatum ist auf jeder einzelnen Verpackung vermerkt.</p>
HA- Konzentration;	20 mg/ml
Inhalt;	2x1ml
Besonderheit;	Vernetzter Hyaluronsäure-Injektionsfüllstoff
Anwendung stiefe;	Oberflächliche und mittlere Dermis
Wirkungsdauer;	6-9 Monate
Nadelgröße;	30G



PRODUKT	Hyamax® Plus Lips
Anwendung;	Hyamax® Plus Lips Filler ermöglicht eine Lippenvergrößerung durch die Injektion von Hyaluronsäure und verleiht dem subdermalen Gewebe Volumen, um schmale Lippen ästhetisch ansprechender zu gestalten.
Beschreibung;	<p>Ein übermäßig schmaler Mund und schmale Lippen können sowohl natürliche als auch altersbedingte Ursachen haben. Eine Möglichkeit, dies zu optimieren, besteht in der Injektion von Hyaluronsäure in die Lippen.</p> <p>Die Lippenvergrößerung mit Hyaluronsäure gestaltet die Lippen nicht nur dreidimensional, voller und sinnlicher, sondern erzeugt auch einen äußerst realistischen Effekt. Nach der Injektion treten keine Abstoßungsreaktionen auf, und sie schädigt den Körper nicht, was sie zu einer sehr sicheren kosmetischen Methode erhebt.</p> <p>Der Füllstoff Hyamax® Plus Lips ist ideal zum Gestalten der doppelten Kurve der Oberlippe, die als „Amorbogen“ bezeichnet wird. Diese Form ähnelt dem Bogen des römischen Liebesgottes Amor. Eine gut definierte und symmetrische Oberlippe wird als besonders attraktiv angesehen.</p>
Lagerbedingungen;	Für optimale Stabilität und Langlebigkeit sollte die Lagertemperatur zwischen 2 °C und 25 °C liegen; idealerweise wird eine Lagerung bei 10 °C empfohlen. Das Produkt sollte vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden. Das Mindesthaltbarkeitsdatum ist auf jeder einzelnen Verpackung vermerkt.
HA-Konzentration;	20 mg/ml
Inhalt;	2x1ml
Besonderheit;	Vernetzter Hyaluronsäure-Injektionsfüllstoff
Anwendungstiefe;	Lippen
Wirkungsdauer;	6-9 Monate
Nadelgröße;	27G




PRODUKT	Hyamax® Plus Deep
ANWENDUNG;	Hyamax® Plus Deep Dermal Filler werden in der mittleren und tiefen Dermis angewendet, um sowohl oberflächliche als auch tiefere Linien im Gesicht zu glätten.
Erläuterung;	<p>Die Haut rund um die Augen ist die dünnste oberflächliche Haut des Körpers und weist eine hohe Dichte an Nerven und Blutgefäßen auf. Mit fortschreitendem Alter neigt sie aufgrund des Kollagenverlusts und der Schrumpfung von Gewebezellen zur Entstehung erster Fältchen.</p> <p>Hyamax® Plus Deep Dermal Filler werden in oberflächliche und tiefere Linien rund um die Augen injiziert, wie Sorgenfalten, Krähenfüße, Zornesfalten, Falten unter den Augen, Stirnfalten und Glabellafalten, um diese zu korrigieren. Darüber hinaus können mit Hyamax® Plus Deep Dermal Fillern auch Augenringe und Lücken an den Schläfen behandelt werden. Nach der Injektion erlangt die Augenpartie ihre Festigkeit und Glätte zurück, sodass Sie die Welt mit selbstbewussteren und strahlenderen Augen betrachten können.</p>
Lagerbedingungen;	Für optimale Stabilität und Langlebigkeit sollte die Lagertemperatur zwischen 2 °C und 25 °C liegen, wobei 10 °C als ideal gelten. Vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung schützen. Das Mindesthaltbarkeitsdatum ist auf jeder Verpackung vermerkt.
HA-Konzentration;	20 mg/ml
Inhalt;	2x1ml
Besonderheit;	Vernetzter Hyaluronsäure-Injektionsfüllstoff
Anwendungstiefe;	Mittlere Dermis
Wirkungsdauer;	6-12 Monate
Nadelgröße;	27G



PRODUKT	Hyamax® Plus Extra Deep
ANWENDUNG;	Hyamax® Plus Extra Deep-Füller werden zur Injektion in die mittlere und tiefe Dermis bei ausgeprägten Fältchen, zur Narbenbehandlung oder zur Volumenerhöhung des Gesichtsgewebes eingesetzt.
Erläuterung;	Die Entstehung von Falten und Gesichtsdpressionen ist ein physiologisches Phänomen, das infolge der Hautalterung und -erschaffung auftritt. Dies kann das ästhetische Erscheinungsbild des Gesichts beeinträchtigen und dazu führen, dass die gesamte Person älter wirkt. Mit den Hautfüllern Hyamax® Plus Extra Deep lassen sich sehr tiefe Falten, wie Lachfalten und Falten an den Mundwinkeln, effektiv auffüllen. Zudem können sie in den Nasenrücken, die Wangen und den Kinnbereich injiziert werden, um die Jugendlichkeit Ihres Gesichts wiederherzustellen und Ihr individuelles Alter zu betonen.
Lagerbedin- gungen;	Für optimale Stabilität und Langlebigkeit sollte die Lagertemperatur zwischen 2 °C und 25 °C liegen, wobei 10 °C als ideal gelten. Vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung schützen. Das Mindesthaltbarkeitsdatum ist auf jeder Verpackung vermerkt.
HA Konzentration;	20 mg/ml
Inhalt;	2x1ml
Besonderheit;	Vernetzter Hyaluronsäure-Injektionsfüllstoff
Anwendung stiefe;	Tiefe Dermis
Wirkungsdauer;	6-12 Monate
Nadelgröße;	27G



PRODUKT	Hyamax® Volumizer Dermal Filler
ANWENDUNG;	Der Hautfüller Hyamax® Volumizer dient der Vergrößerung von Wangen und Kinn und verleiht dem mittleren Gesichtsbereich sowie dem Kieferbereich mehr Fülle.
Erläuterung;	<p>Mit fortschreitendem Alter verringert sich der Wassergehalt der Haut aufgrund der unterschiedlichen Verteilung von Genen, Fett und Muskeln. Die Dermis wird dünner, die Menge an losem Fett in der Dermis nimmt ab, und die Muskeln verkümmern, was zu eingefallenen Wangen führt. Zudem können genetische Faktoren, ungünstige Atemgewohnheiten und ein fehlerhafter Biss zu Kieferanomalien führen.</p> <p>Hyamax® Volumizer Hautfüller sind monophasisch und nutzen eine Vernetzungstechnologie, die eine dreidimensionale Netzwerkstruktur schafft. Die ausgezeichnete Kohäsion verhindert die Verteilung und das Fließen des Fillers in Wasser und Körperflüssigkeiten, was zu einer erhöhten Stabilität sowie optimaler Volumenbildung und -formgebung führt. Ideal zum Auffüllen von eingefallenen Wangen und Kinn.</p>
Lagerbedingungen;	Für optimale Stabilität und Langlebigkeit sollte die Lagertemperatur zwischen 2 °C und 25 °C liegen, wobei 10 °C als ideal gelten. Vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung schützen. Das Mindesthaltbarkeitsdatum ist auf jeder Verpackung vermerkt.
HA Konzentration;	20 mg/ml
Inhalt;	2x2ml
Besonderheit;	Injizierbarer Füllstoff aus monophasischer, vernetzter Hyaluronsäure.
Anwendungstiefe;	Kinn/Nasenrücken/Wange/Gesichtsmitte
Wirkungsdauer;	18 Monate
Nadelgröße;	27G

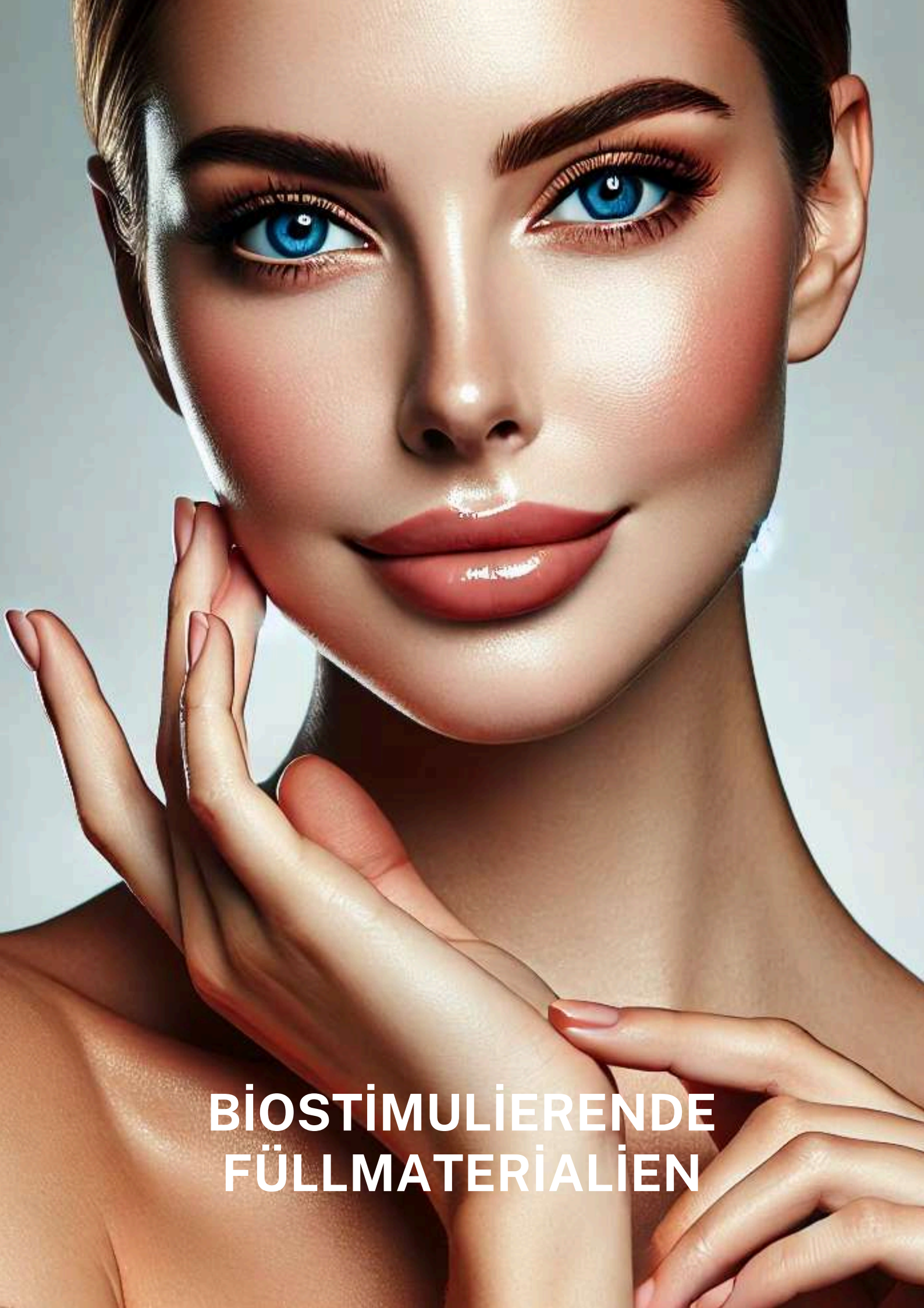


**BIOSTIMULIERENDE
FÜLLMATERIALIEN**



PRODUKT	Hyamax® CaHA Lido injizierbares Gesichtsimplantat
ANWENDUNG;	Das injizierbare Gesichtsimplantat Hyamax® CaHA Lido dient als tief wirkender dermaler und subdermaler Weichteilfüller zur Formung und Wiederherstellung der Gesichtskontur durch die Korrektur von Weichteilmangel im Gesicht des Patienten.
Erläuterung;	<p>Hyamax® CaHA vernetztes Calciumhydroxylapatit-Hyaluronsäuregel stellt eine optimale halb feste, nicht-chirurgische Gesichtsfüllerformulierung dar, die aus 70 % halb festem Gel und 30 % Calciumhydroxylapatit-Mikrokugeln besteht. Calciumhydroxylapatit ist ein natürlicher Bestandteil des menschlichen Körpers, biokompatibel und fördert die Bildung neuer natürlicher Gewebe an der Injektionsstelle. Seine Wirkung hält länger an als die anderer Füllstoffe. In seltenen Fällen können Anzeichen von Entzündungen oder Abstoßungen auftreten, jedoch ist es äußerst sicher und kann vollständig vom Körper metabolisiert und absorbiert werden. Gleichzeitig stimuliert es die Bildung von Kollagen und Elastin, was zur Entstehung neuer Skelettstrukturen führt. Kollagenfasern und eine neu gebildete Kollagenmatrix verankern die Mikrokugeln, minimieren das Risiko einer Verschiebung und beseitigen die Möglichkeit einer Migration des Füllstoffs.</p> <p>Hyamax® CaHA vernetztes Calciumhydroxylapatit-Hyaluronsäuregel füllt umgehend Linien, Fältchen und Vertiefungen in der Haut auf und verleiht der Kieferpartie sowohl Volumen als auch Form. Zudem stimuliert es das Wachstum von Kollagen und Elastin, erhöht die Hautelastizität und sorgt für mehr Halt der Haut.</p>
Lagerbedingungen;	Für optimale Stabilität und Langlebigkeit sollte die Lagertemperatur zwischen 2 °C und 25 °C liegen, wobei 10 °C als ideal gelten. Vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung schützen. Das Mindesthaltbarkeitsdatum ist auf jeder Verpackung vermerkt.
HA-Konzentration;	20 mg/ml - Vernetzte Hyaluronsäure
Inhalt;	2x1ml
Wirkungsdauer;	18-36 Monate




VOR

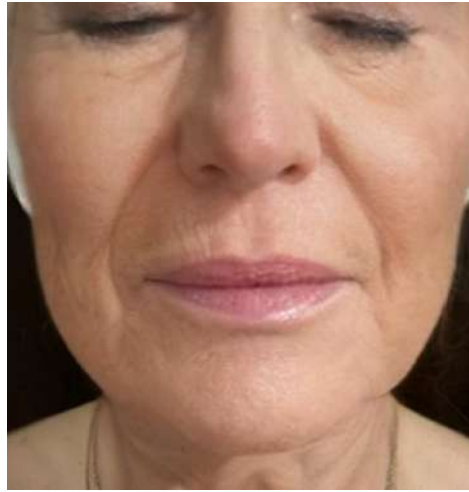

1 MONAT SPÄTER



NACH DREI MONATEN

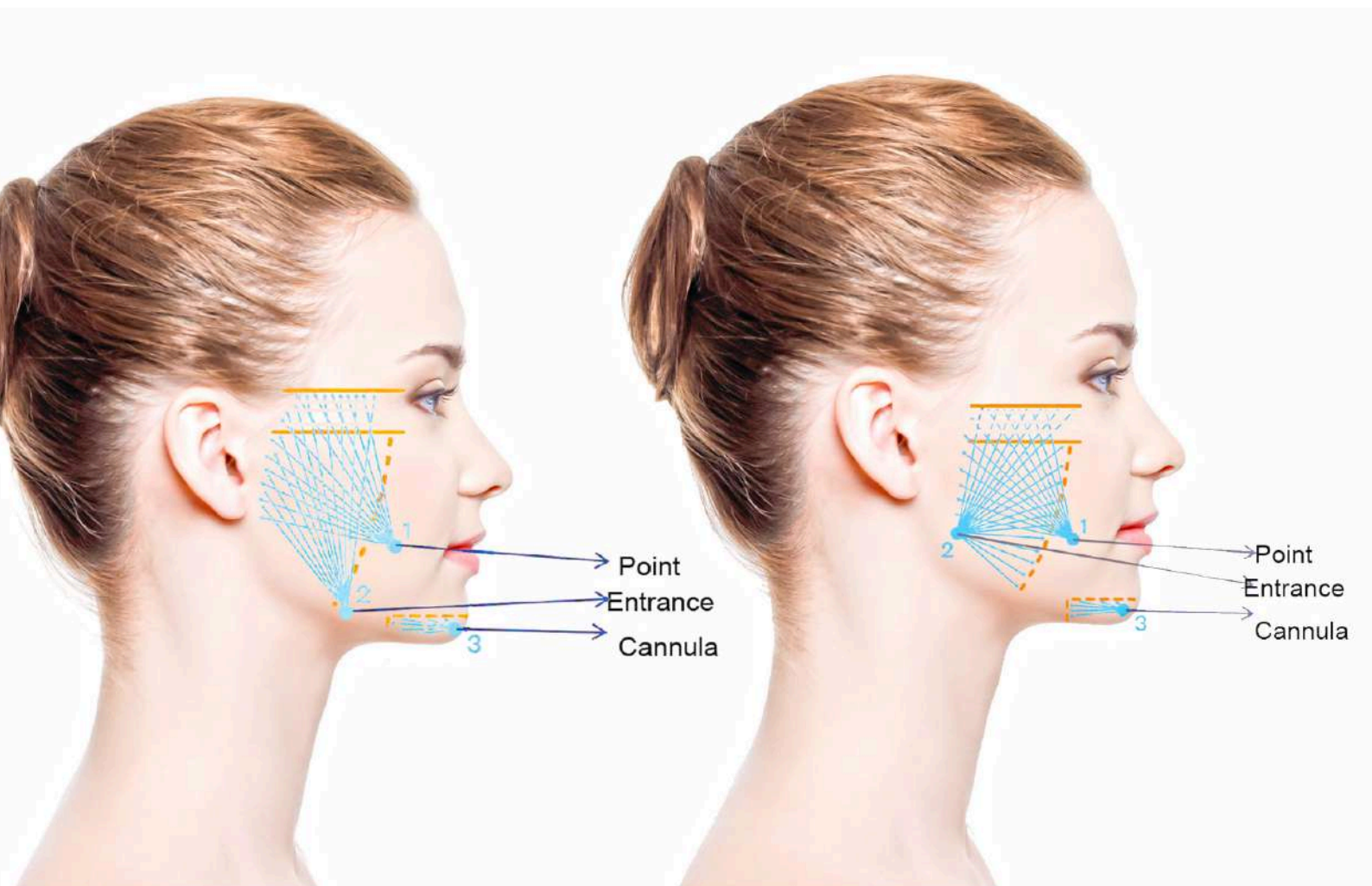



PRODUKT	Hyamax® PLLA (POLY-L-MILCHSÄURE-FÜLLSTOFF)
ANWENDUNG;	Hyamax® PLLA wird eingesetzt, um sowohl oberflächliche als auch tiefere Unregelmäßigkeiten der Nasolabialkontur zu korrigieren, feine Linien und Fältchen im Wangenbereich zu beseitigen, verlorenes Fett im Gesicht wiederherzustellen und Anzeichen einer Gesichtslipodystrophie zu behandeln.
Erläuterung;	Hyamax® PLLA ist ein injizierbarer Füllstoff, der 150 mg Polymilchsäure-Mikrokügelchen in Fläschchen A und 5 ml unvernetzter Hyaluronsäure mit Lidocain in Fläschchen B enthält. Vor der Verwendung sollten die Inhalte der Flaschen A und B vermischt und die Mischung anschließend gründlich geschüttelt werden.
Lagerbedingungen;	Für optimale Stabilität und Langlebigkeit sollte die Lagertemperatur zwischen 2 °C und 25 °C liegen, wobei 10 °C als ideal gelten. Vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung schützen. Das Mindesthaltbarkeitsdatum ist auf jeder Verpackung vermerkt.
Dauerhaftigkeit;	24 Monate
Flasche A;	Poly-L-Milchsäure-Mikrokügelchen (PLLA)
Flasche B;	Nicht vernetzte Hyaluronsäure, Lidocainhydrochlorid
Injektionsstelle;	Gesicht/ Hals/ Dekolleté/ Handrücken

VOR



NACH EINEM MONAT



Hyamax® CaHA Lido injizierbares Gesichtsimplantat

VOR



NACH



VOR



NACH



VOR

Hyamax® PLLA (POLY-L-MILCHSÄURE-FÜLLSTOFF)

NACH



VOR



NACH





BIOLOGICAL
LIFTING
INJECTION

BIOLOGISCHER LIFTING-IMPFSTOFF



PRODUKT	Hyamax® SUPER HYDRA Dermal Tiefen-Biorevitalisierer
ANWENDUNG;	Es wird zur Förderung von Anti-Aging-Effekten im Gesicht eingesetzt, steigert die Feuchtigkeit, Elastizität und Strahlkraft der Haut und strafft sowie hebt erschlaffte Haut.
Erläuterung;	<p>Hyamax® Super Hydra ist ein bahnbrechender Hautrevitalisierer mit einer leistungsstarken Formel, die Aminosäuren, Peptide sowie hoch- und niedermolekulare Hyaluronsäure umfasst. Die Synergie der Inhaltsstoffe schützt und erneuert die extrazelluläre Matrix, stärkt das tiefere Bindegewebe des Gesichts und stimuliert die Regeneration der Struktur der Gesichtsbänder und Fettpolster. Es stellt effektiv die Physiologie wieder her, mindert die Anzeichen der Hautalterung und korrigiert Unregelmäßigkeiten sowie Mängel in der Hautstruktur.</p> <p>Hyamax® Super Hydra besitzt eine verjüngende Wirkung und stellt eine einzigartige Lösung für all jene dar, die die Feuchtigkeit ihrer Haut steigern und ihrem Gesicht sein jugendliches Aussehen zurückgeben möchten.</p>
Lagerbedingungen;	Für optimale Stabilität und Langlebigkeit sollte die Lagertemperatur zwischen 2 °C und 25 °C liegen, wobei 10 °C als ideal gelten. Vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung schützen. Das Mindesthaltbarkeitsdatum ist auf jeder Verpackung vermerkt.
Produktinhalt;	80 mg/1 Injektion – LMW + HMW Hyaluronsäure (hoch- und niedermolekulare Hyaluronsäure) 7 Aminosäuren (Glycin, L-Prolin, L-Leucin, L-Lysin HCL, L-Alanin, L-Valin, L-Arginin HCL) 3 Peptid (Oligopeptid-24, Acetyltetrapeptid-5, Acetyldecapeptid-3)
Lieferumfang;	2x2,5 ml
Wirkungsdauer;	6 Monate

Injektionstechniken

6 Injektionspunkte mit 0,2 ml sowie 1 Punkt am Kinn mit 0,1 ml

- Orbital thickening
- Zygomaticus ligament
- Plastyma auricular fascia
- Upper Masseteric cutaneous ligament
- Masseteric cutaneous ligament
- Mandibular septum
- Chin





HYAMAX®
MESOTHERAPIE-LÖSUNGEN



PRODUKT	Hyamax® HA 18
Inhalt;	Wasser, Natriumhyaluronat, Sorbit, Prolin, Serin, Alanin, Isoleucin, Leucin, Asparaginsäure, Tyrosin, Glutaminsäure, Phenylalanin, Argininhydrochlorid, Lysinhydrochlorid, Valin, Threonin, Histidinhydrochlorid, Tryptophan, Methionin, Cystin, Glycin, Dinatriumhydrogenphosphat, Natriumdihydrogenphosphat, wasserfreies Natriumsulfat.
Indikationen;	<ul style="list-style-type: none"> • Hyamax ® Mesotherapie HA18 ist Hyaluronsäure, die durch 18 Aminosäuren ergänzt wird. Aminosäuren steuern den Wasser-Öl-Haushalt der Haut, stärken die Immunfunktion und verhindern wirksam die Bildung von Fältchen und Flecken, indem sie die Zellaktivität und Elastizität der Haut erhalten. • Minimiert feine Linien. • Versorgt die Haut mit Feuchtigkeit. • Es wird Wärme abgegeben. • Das Sitzungsintervall umfasst 3 Sitzungen, die im Abstand von 14 Tagen stattfinden.
Lagerbedingungen;	Für optimale Stabilität und Langlebigkeit sollte die Lagertemperatur zwischen 2 °C und 25 °C liegen, wobei 10 °C als ideal gelten. Vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung schützen. Das Mindesthaltbarkeitsdatum ist auf jeder Verpackung vermerkt.
Lieferumfang;	5x4 ml



VOR



1.CHANCEN



2.CHANCEN



PRODUKT	Hyamax® PDRN60
Inhalt;	Wasser, Natriumchlorid, Dinatriumhydrogenphosphat, Natriumdihydrogenphosphat, PDRN, Natriumacetyliertes Hyaluronat, Tripeptid-1-Kupfer, Tripeptid-1, Acetyl, Hexapeptid-8, DMAE.
Indikationen;	<p>Bei der Hyamax® PDRN-Mesotherapie handelt es sich um Hyaluronsäure, die mit PDRN und weiteren Wirkstoffen angereichert ist. Hyaluronsäure steigert den Wassergehalt der Haut, verleiht ihr Feuchtigkeit und Glanz und fördert die Geschmeidigkeit. PDRN ist ein aus Lachs gewonnener Extrakt, der die Zellerneuerung fördert, entzündungshemmend wirkt und die Hautbarriere repariert.</p> <p>PDRN trägt zur Vorbeugung von Hautentzündungen bei, indem es die Adenosin-A2a-Rezeptoren aktiviert, und hat zudem einen positiven Einfluss auf die Hautaufhellung.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Es behandelt Akne, Hautunreinheiten und Pickel. • Versorgt die Haut mit Feuchtigkeit und strafft sie. • Mildert Fältchen und steigert den Glanz. • Sitzungsintervall: 3 Sitzungen im Abstand von zwei Wochen
Lagerbedingungen;	Für optimale Stabilität und Langlebigkeit sollte die Lagertemperatur zwischen 2 °C und 25 °C liegen, wobei 10 °C als ideal gelten. Vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung schützen. Das Mindesthaltbarkeitsdatum ist auf jeder Verpackung vermerkt.
Lieferumfang;	5x4 ml



VOR





1.CHANCEN



2.CHANCEN



PRODUKT	Hyamax® BIOSAFFRON GLOW
Inhalt;	Wasser, Bernsteinsäure, Natriumhyaluronat, Safran-Stigma-Extrakt, Tranexamsäure, Panthenol, Prolin, Glycin, Glutathion.
Erläuterung;	<p>Diese innovative, hautstimulierende Behandlung fördert die natürlichen Regenerationsprozesse der Haut, verringert das Auftreten dunkler Flecken und stellt einen gesunden Hautton wieder her. Mit einer speziellen Kombination aus 1,5 % Bernsteinsäure, Hyaluronsäure und Safranextrakt formuliert, versorgt sie die Haut mit Feuchtigkeit und schützt sie gleichzeitig vor freien Radikalen.</p> <p>Bernsteinsäure fördert die natürlichen Regenerationsprozesse der Haut, mindert die Anzeichen der Hautalterung und trägt dazu bei, dass die Haut jugendlich und gesund erscheint.</p> <p>Wirksame Inhaltsstoffe wie Niacinamid, Tranexamsäure und Glutathion reduzieren Hautverfärbungen und verleihen der Haut einen natürlichen Glanz.</p>
Lagerbedingungen;	<p>Für optimale Stabilität und Langlebigkeit sollte die Lagertemperatur zwischen 2 °C und 25 °C liegen, wobei 10 °C als ideal gelten. Vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung schützen.</p> <p>Das Mindesthaltbarkeitsdatum ist auf jeder Verpackung vermerkt.</p>
Lieferumfang;	5x5 ml

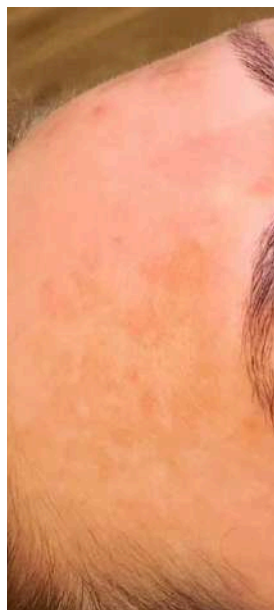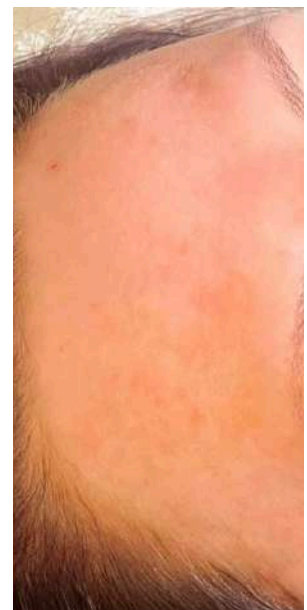
VOR

1.CHANCEN

2.CHANCEN



PRODUKT	Hyamax® Augen-Boosterser
Inhalt;	Natriumhyaluronat, Ethylenglykolphenylether, Phenylmethanol, Prolin, Serin, Glycin, Niacinamid, Glutathion, Wasser für Injektionszwecke.
Erläuterung;	<p>Angereichert mit einem speziellen Komplex, der entwickelt wurde, um die empfindliche Haut um die Augen intensiv mit Feuchtigkeit zu versorgen, aufzuhellen, Mattheit zu beseitigen und dunkle Ringe zu reduzieren, bietet der Eye Booster die umfassende Pflege, die Ihre Augen benötigen.</p> <p>Es bietet der empfindlichen Haut der Augenpartie intensive Feuchtigkeit und trägt somit zu einem gesünderen und frischeren Erscheinungsbild bei.</p> <p>Durch seinen einzigartigen Komplexgehalt verleiht es der Augenpartie einen strahlenden Glanz und beseitigt das matte Erscheinungsbild.</p> <p>Es mindert Augenringe und verleiht ein lebendigeres sowie ausgeruhteres Erscheinungsbild.</p>
Lagerbedingungen;	Für optimale Stabilität und Langlebigkeit sollte die Lagertemperatur zwischen 2 °C und 25 °C liegen, wobei 10 °C als ideal gelten. Vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung schützen. Das Mindesthaltbarkeitsdatum ist auf jeder Verpackung vermerkt.
Lieferumfang;	5x5 ml



VOR



1.CHANCEN



2.CHANCEN



PRODUKT	Hyamax® BTX+
Inhalt;	Natriumhyaluronat, Ethylenglykolphenylether, Phenylmethanol, 2-(Methylamino)ethanol, Acetylhexapeptid-8, Injektionswasser
Erläuterung;	Erhöht die Produktion von Tropokollagen, reguliert die Synthese wirksamer Elemente in der Hauternährung und revitalisiert die extrazelluläre Matrix. Wirkt gegen Hautalterung, hat eine Botox-ähnliche Wirkung, spendet Feuchtigkeit und verbessert die Hautqualität, gleicht den Hautton aus, strafft sofort und reduziert Erschlaffung sowie Fältchen im Gesicht.
Lagerbedingungen;	Für optimale Stabilität und Langlebigkeit sollte die Lagertemperatur zwischen 2 °C und 25 °C liegen, wobei 10 °C als ideal gelten. Vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung schützen. Das Mindesthaltbarkeitsdatum ist auf jeder Verpackung vermerkt.
Lieferumfang;	5x5 ml

VOR



1.CHANCEN



2.CHANCEN






PRODUKT	Hyamax® SCALP ULTRA
Inhalt;	Natriumhyaluronat, Ethylenglykolphenylether, Phenylmethanol, Glycerin, Sapindus-Extrakt, hydrolysiertes Kollagen, Wasser für Injektionszwecke
Erläuterung;	<p>Hyamax SCALP ULTRA wurde speziell konzipiert, um das Haarwachstum zu fördern, indem es die Haarwurzeln stärkt und die Durchblutung der Kopfhaut verbessert. Es repariert die Struktur der Kopfhaut und rekonstruiert die Haarfasern, wodurch das Haarwachstum unterstützt wird.</p> <p>Es unterstützt ein gesundes Haarwachstum, indem es die Kopfhaut nährt und die Haarwurzeln kräftigt. Es fördert das Haarwachstum und sorgt für volleres sowie gesünderes Haar. Während es den Haarausfall verringert, unterstützt es das Haar dabei, seine natürliche Farbe zu erhalten. Es umfasst sorgfältig ausgewählte natürliche Inhaltsstoffe, um die Kopfhaut und die Haarfollikel mit den erforderlichen Nährstoffen zu versorgen.</p>
Lagerbedingungen;	Für optimale Stabilität und Langlebigkeit sollte die Lagertemperatur zwischen 2 °C und 25 °C liegen, wobei 10 °C als ideal gelten. Vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung schützen. Das Mindesthaltbarkeitsdatum ist auf jeder Verpackung vermerkt.
Lieferumfang;	5x5 ml



VOR



1.CHANCEN

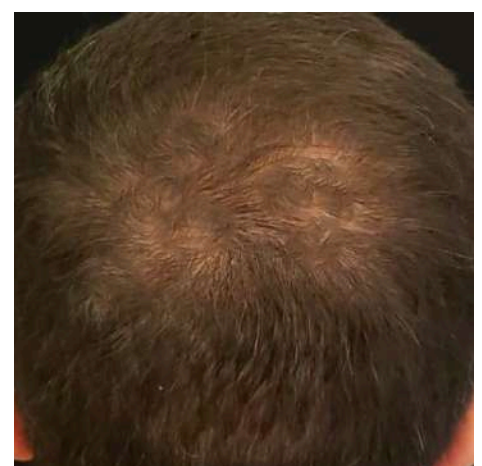


2.CHANCEN




PRODUKT	Hyamax® LIPO +
Inhalt;	Phenylmethanol, Butandiol, Pentapeptid-25, DL-Carnitinhydrochlorid, Propylenglykol, Natriumdesoxycholat, Cholesterin, Xanthangummi, Dehydroessigsäure, Tween 80, Wasser für Injektionszwecke.
Erläuterung;	Hyamax LIPO PLUS enthält eine Vielzahl von Wirkstoffen, die den Abbau, die Aufnahme und den Transport von Fett aus Fettzellen oder gespeicherten Fettdepots unterstützen, um lokale Fettansammlungen im Bereich des Kinns, der Konturen, der Bauchfalten, der Oberarme, der Oberschenkel, des Gesäßes, der Knie und der Bauchregion zu reduzieren.
Lagerbedingungen;	Für optimale Stabilität und Langlebigkeit sollte die Lagertemperatur zwischen 2 °C und 25 °C liegen, wobei 10 °C als ideal gelten. Vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung schützen. Das Mindesthaltbarkeitsdatum ist auf jeder Verpackung vermerkt.
Lieferumfang;	5x5 ml



VOR

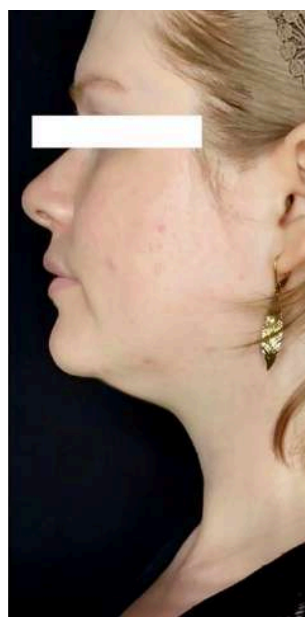


1.CHANCEN

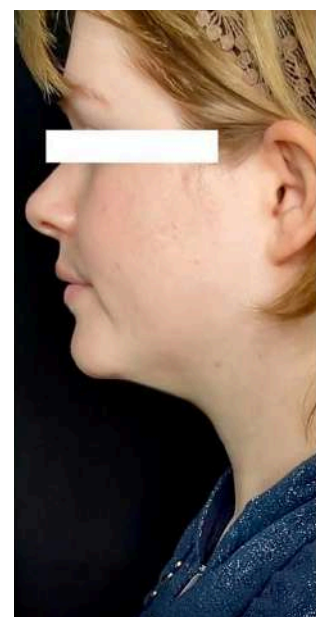

2.CHANCEN

ANMERKUNGEN;

A series of horizontal dotted lines spanning the width of the page, providing a template for handwritten notes.

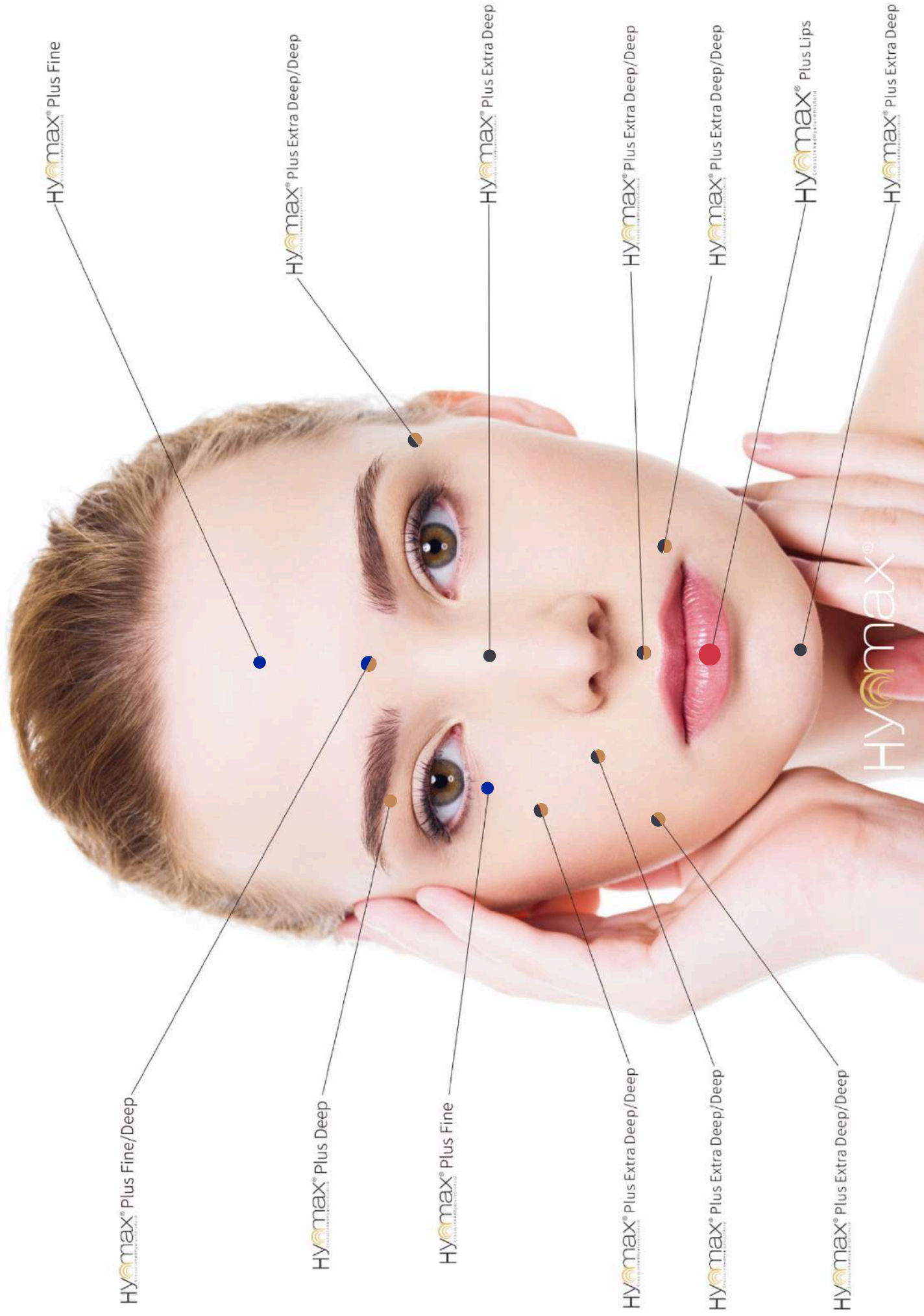

Hyamax[®] Plus Fine

Hyamax[®] Plus Extra Deep/Deep

Hyamax[®] Plus Extra Deep

Hyamax[®] Plus Extra Deep/Deep

Hyamax[®] Plus Extra Deep/Deep

Hyamax[®] Plus Lips

Hyamax[®] Plus Extra Deep

Hyamax[®] Plus Fine/Deep

Hyamax[®] Plus Deep

Hyamax[®] Plus Fine

Hyamax[®] Plus Extra Deep/Deep

Hyamax[®] Plus Extra Deep/Deep

Hyamax[®] Plus Extra Deep/Deep

Hyamax[®]



... LABORATORIES ...
HYAMED
• GENEVA •


Geneva Switzerland

 mail@skpharmamedical.com

 [skpharmamedical](https://www.instagram.com/skpharmamedical)

 skpharmamedical.com